



R.E.T. Rettungs Einsatz Tourniquet



REF.: 11129
PATENTED MODEL

- Intuitive Anwendung auch für Ungeübte.
- Desinfizieren und Dekontaminieren möglich.
- Robust und wiederverwendbar.
- Intuitive application even for inexperienced.
- Disinfection and decontamination possible.
- Robust and reusable.

Verwendung des RET Tourniquet

- 1** Bringen Sie das RET oberhalb der Blutung in Position.
Place the RET above the critical bleeding.



- 2** Ziehen Sie das RET mit Daumen und Zeigefinger möglichst stramm.
Tighten the RET with thumb and index finger.



- 3** Nutzen Sie den Hebel mit dem Daumen und drücken Sie mit Zeige- und Ringfinger vorne, um ein durchrutschen zu verhindern.

Use the lever with your thumb and press front end down with your index and ring finger to prevent slipping.



- 4** Notieren Sie die genaue Zeit des Abbindens auf dem RET. Das ist wichtig für weiter Behandelnde!

Note the exact time of setting on the RET. This is important for further treatment!



- 5** Öffnen lässt sich das RET mit dem Hebel in der Mitte der Ratsche (ACHTUNG: Das angelegte RET darf nur durch Fachpersonal geöffnet werden).

The RET can be opened with the lever in the middle of the ratchet (ATTENTION: The installed RET may only be opened by qualified personnel).



- 6** Bringen Sie das RET oberhalb der Blutung in Position. Falls nötig lässt sich das RET komplett öffnen.

Place the RET above the critical bleeding. If necessary, the RET can be opened completely.





SICHERHEIT – 360° Rundumblick Wo ist die Beste Deckung? MELDUNG

Situationsbedingt – SELBSTUNTERSUCHUNG – Ansprache von Verwundeten

C	CRITICAL BLEEDING ERKENNE lebensbedrohliche Blutungen und STOPPE diese » Hals / Achseln / Leiste – direkter Druck » Beine / Arme – Tourniquet	M
A	Airways Nase, Mund-Rachenraum frei? Bereich Kehlkopf ok?	A
B	Breathing Wenn A unauffällig, Kopf nackenwärts beugen sehen / hören / fühlen Thorax Sichtkontrolle, Stabilität CHECK THE BACK	R
C	Circulation Puls? ReKap Zeit? Große Blutungsräume: Abdomen? Becken? Oberschenkel? Weitere Blutungsquellen?	C
D	Disability Augen? Orientiert? Hände und Füße auf Aufforderung beweglich? Headinjury?	H
E	Exposure Entkleiden, nach weiteren Verletzungen suchen – ausführlicher Bodycheck, WÄRME- erhalten, Dokumentation (so viel wie nötig, so wenig wie möglich entkleiden)	



www.erste-hilfe-spezial.de

Name:	Wann verletzt? Kinematik?:
Geb.Datum / ID:	Blutgruppe / Bloodtype:
Initialwerte: Ansprechbar ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	SpO2 R/R Puls ReKap

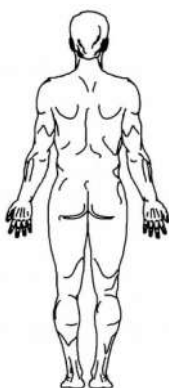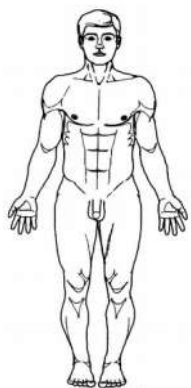

Tourniquets (T) (Zeit)
Atemwegsicherung?
 Guedel Wendel Larynx

Markierung
 Chest Seal (CS)
 Wunde (W)
 Tourniquet (T)
 Zugang (IV)
 Verbrennung (V)
 Fraktur (#)
 Quick Clot (QC) Anzahl ____
 Nadel Entlastung (NE)

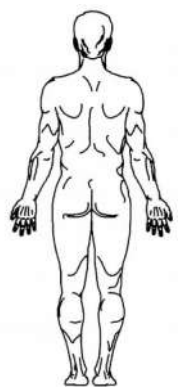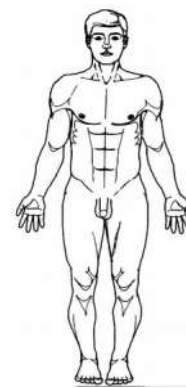

Diagnose / weitere Maßnahmen: